


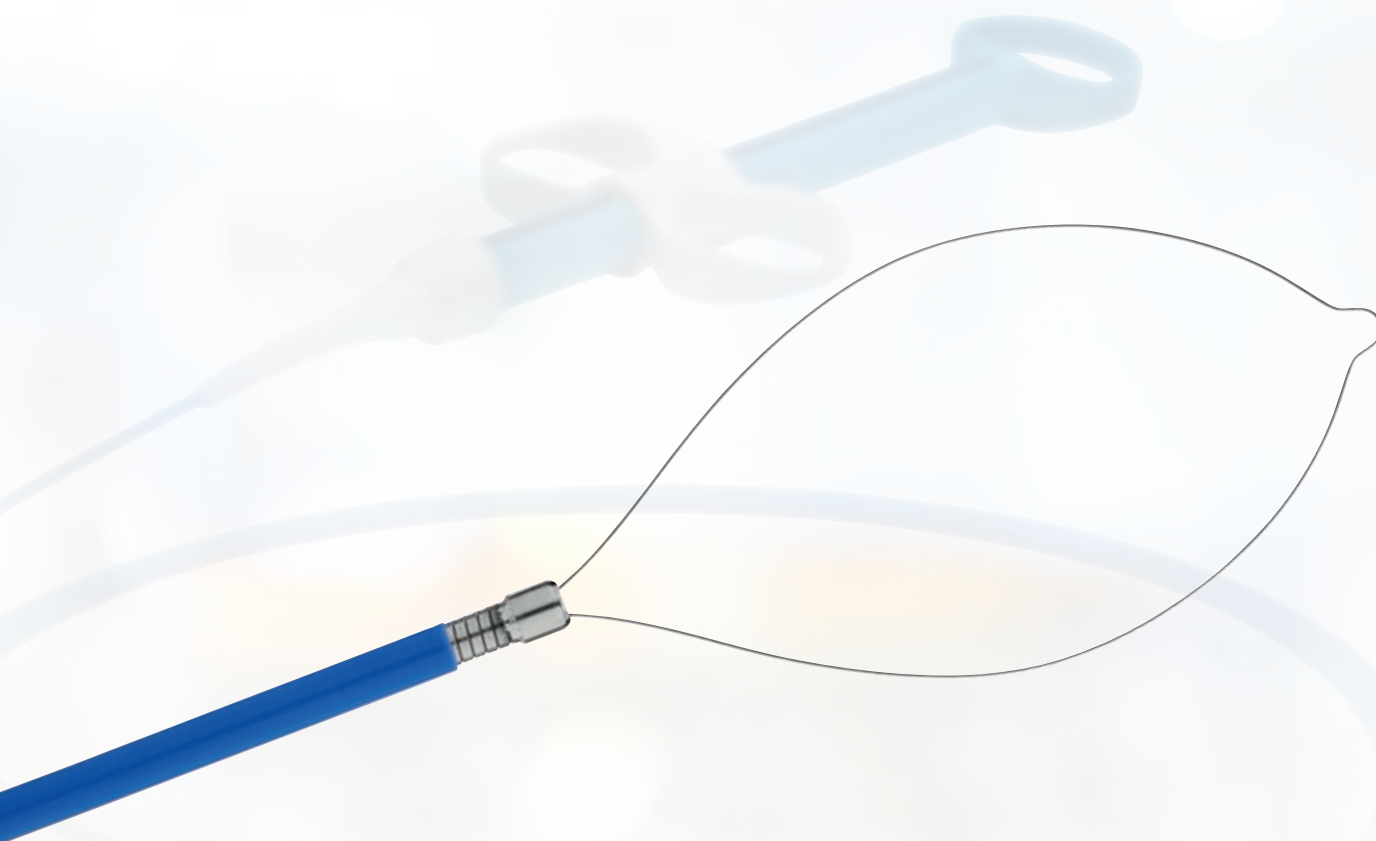

LESIONHUNTER COLDSNARE

EFFICIËNTE EN NAUWKEURIGE RESECTIE

Met de LesionHunter Coldsnares breidt MICRO-TECH zijn assortiment koude snaren uit met een vormvast model voor nauwkeurige resecties. De lis bestaat uit een roteerbaar nitinoldraad die zelfs na meerdere resecties zijn ovale vorm behoudt, waardoor een consistente grip op het weefsel wordt gegarandeerd. De bijzonder dunne


nitinoldraad van 0,18 mm snijdt soepel door het weefsel en laat de poliep achter in het resectiebed, zodat deze gemakkelijk kan worden gevonden en verwijderd. De LesionHunter Coldsnares is verkrijgbaar in drie diameters – 10, 15 en 20 mm – en biedt daarmee voor veel poliep groottes de juiste oplossing.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN


- Roteerbare, vormvaste lis voor extra duurzaamheid
- Dunne nitinoldraad voor een zuivere snede
- Spiraalvormige metalen katheter voor meer stabiliteit tijdens resectie
- Ergonomische 3-rings handgreep voor nauwkeurige controle
- Verwijderd weefsel blijft achter in het resectiebed en is gemakkelijker terug te vinden




Elke beweging van de ergonomische handgreep wordt direct overgebracht op de lis – voor nauwkeurige rotatie en zuivere sneden.

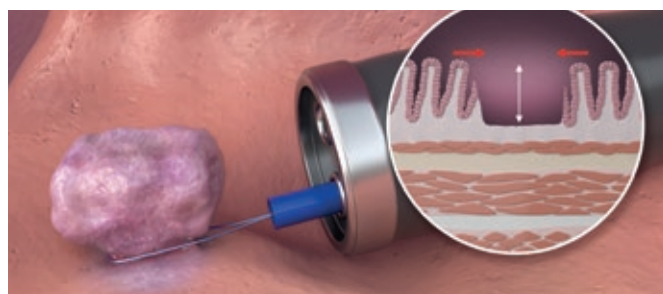


Het verwijderen van kleine poliepen met een coldsnaare kan het risico op nabloedingen verminderen.

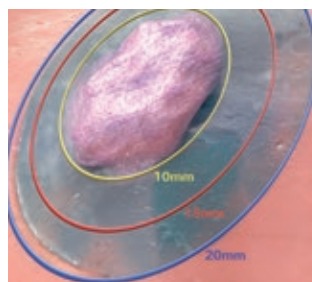

Dankzij de drie beschikbare diameters van de LesionHunter kan een lis worden gekozen die de poliep volledig omsluit. Hierdoor kan na de resectie een veilige afstand tot het gezonde weefsel rondom de resectieplaats worden bereikt.

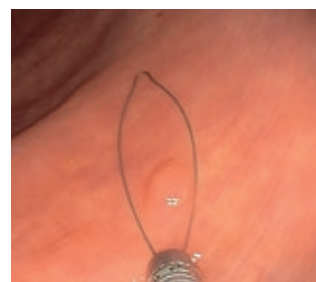

De LesionHunter Coldsnaare omsluit de poliep volledig en zorgt dankzij de ultradunne monofilament nitinoldraad van 0,18 mm voor een zuivere snede.

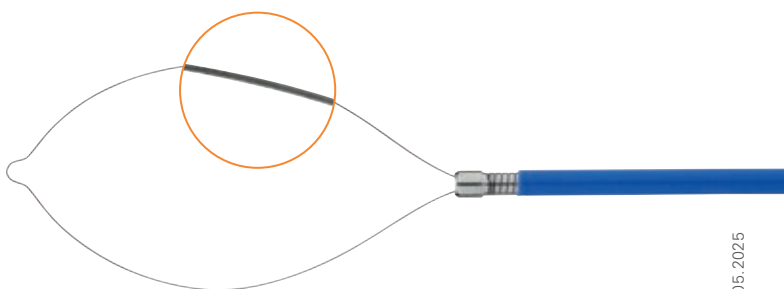

In tegenstelling tot traditioneel gevlochten koude snaren bestaat de LesionHunter uit een 0,18 mm dunne monofilament nitinoldraad.

SPECIFICATIES

REF	Max. buitendiameter mm	Werklengthe mm	Snaar Ø mm	Snaarvorm	Snaardikte mm
LESIONHUNTER COLDSNARE					
CS2-21023231	≤2,5	2300	10	ovaal	0,18
CS2-21523231	≤2,5	2300	15	ovaal	0,18
CS2-22023231	≤2,5	2300	20	ovaal	0,18

Verpakkingseenheid: 10 stuks